

渦流浴装置 ワールプール

部分浴治療の“しやすさ”をかたちにしたワールプール



上下肢用

標準・シンプルタイプの2機種をご用意しました。

WP-300

■主な機能

- ①噴流ノズル (前2、後1) ②加温ヒーター (1KW) ③間欠噴流機能 ④週間タイマー

グリーン

ピンク

バイオレット



治療のしやすさ 1：トランスファー&ポジショニング



①シートを浴槽幅より左右に10cm程突出させて広くしているため、乗り移りの時に腰をシートに載せやすい上、下肢を槽内に移す時も安定した姿勢が確保できます。



②さらに片脚治療では、浴槽縁がまたぎやすいので、安定した姿勢で治療できます。



③本体下部をへこませて奥行きを確保しました。このため上肢治療の時に少しでも浴槽に近づけて、負担の少ない姿勢で治療ができます。



上下肢用・シンプルタイプ

WP-350

■噴流ノズルを2箇所とし、手すりもWP-300の②～④を除くシンプルタイプです。手すり (WP-355) はオプションです。



上肢用

WP-400

浴槽の奥行きを65cmと広くして、上肢を充分湯内に浸して治療できます。

■主な機能

- ①噴流ノズル (前後各1) ②加温ヒーター (500W) ③間欠噴流機能 ④週間タイマー



全身用

WP-500

シートを標準装備しているため、槽内へ乗り移る時の補助となる他、下肢治療用としてもお使いいただけます。

■主な機能

- ①噴流ノズル (前後左右各1) ②保温ヒーター (1KW) ③間欠噴流機能

※写真は、オプションの枕WP-510付です。

Rehabilitation
SAKAI

治療のしやすさ 2 : 操作性・機能性

- 噴流方式を、連続・間欠式より選択できます。(WP-350 を除く)
間欠噴流: 噴出-休止を5秒・10秒毎の2サイクルで切替えられます。
- ノズル選択スイッチにより、治療に使うノズルをあらかじめ設定できます。(WP-350 を除く)
- 加温ヒーター標準装備。(WP-500・350は保温ヒーター式)
- 週間タイマー(デジタル式)により、治療の開始時間に合わせて加温できます。(WP-500・350を除く)



■操作パネル

■付属品



保温マット

ボディカラーは、3色からお選びいただけます。

- 標準カラー: グリーン、ピンク
- オプションカラー: バイオレット

■オプション



手すり WP-355
(WP-350 用)



枕 WP-510

ワールプूल WP-300・WP-350・WP-400・WP-500各仕様

型式	WP-300	WP-350	WP-400	WP-500	
治療部位	上下肢用	上下肢用	上肢用	全身用	
寸法・質量等	外形寸法(W×L×H)	795×1250×1005	795×1250×740	480×940×775	965×1875×935
	浴槽外寸	795×1250×740	←	480×940×775	965×1860×665
	浴槽内寸	470×760×550	←	375×650×300	585×1350×500
	容量(r)	約105(適量レベル)	←	約50(適量レベル)	約235(適量レベル)
	質量(kg)	約90	約75	約70	約120
噴流装置	ノズル	3(前2、後1)	2(前)	2(前後各1)	4(前後左右各1)
	振れ角	50°(±25°)	←	←	←
	選択スイッチ	○	←	○	←
	流量調節バルブ	1	←	←	←
エア量調節バルブ	1	←	1	←	
間欠噴流機能	○	←	○	←	
ポンプ	出力	100V/400W	100V/250W	100V/250W	100V/400W
	揚程(m)	10~15	9~14.5	9~14.5	10~15
	吐出量([50Hz] / [60Hz] r/min)	110/130	55/65	←	110/130
湯温管理	ヒーター	保温用 加温用	500W	←	1.0KW(0.5KW×2)
	温度調節	0~45°(デジタル表示)	←	500W	←
タイマー機能	週間タイマー	○	←	○	←
	治療時間設定(最大)	99分(デジタル表示)	←	←	←
排水機能	オーバーフロー	○	←	←	←
	強制排水(r/min)	約35(バルブ操作)	約26(バルブ操作)	約17(バルブ操作)	約50(バルブ操作)※
	自然排水	ハンドル操作	←	←	←
安全装置	漏電ブレーカー	○	←	←	←
	空焚き防止	水位センサー	←	←	←
	過昇温防止	温度ヒューズ	←	←	←
	手すり	着脱可(跳ね上げ式)	オプション	←	着脱可(跳ね上げ式)
材質	浴槽・カバー/フレーム	FRP / スチール	←	←	←
座面シート	横長形状・張出し型	←	←	横長形状・張出し型	
電源/消費電力	AC100V / 1.1KVA	AC100V / 1.05KVA	AC100V / 1.1KVA	←	
移動用キャスター	○	←	←	←	
アジャスター	○	←	←	←	
カラー	標準カラー	グリーン、ピンク	←	←	
	オプションカラー	バイオレット	←	←	
その他	保温マット付	保温マット付 オプション: 手すりWP-355	保温マット付	保温マット付 オプション: 枕WP-510	

*仕様は、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

※自然排水と強制排水を同時使用した場合。

●詳しくは最寄りの営業所へお問い合わせください。

酒井医療株式会社

東京都文京区本郷3丁目15番9号 〒113-0033
www.sakaimed.co.jp

札幌営業所	Tel: 011-780-5570	名古屋営業所	Tel: 052-263-9867
盛岡営業所	Tel: 019-656-3221	金沢営業所	Tel: 076-223-4420
仙台営業所	Tel: 022-231-4481	大阪営業所	Tel: 06-6386-3545
新潟営業所	Tel: 025-286-1788	神戸営業所	Tel: 078-811-6031
埼玉営業所	Tel: 048-255-0451	広島営業所	Tel: 082-871-0420
千葉営業所	Tel: 047-497-3691	高松営業所	Tel: 087-841-3144
東京営業所	Tel: 03-5800-3076	福岡営業所	Tel: 092-473-8481
国分寺営業所	Tel: 042-320-2680	鹿児島営業所	Tel: 099-252-5251
横浜営業所	Tel: 045-944-4478	白井工場	Tel: 047-497-1911

取扱店

ISO 9001 認証取得工場



CENTURY REGISTRAR

OS Accreditation
R025